

## NAIL PRO

### Obcinacz do wrastających lub grubych paznokci



#### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Ten przyrząd jest wyposażony w specjalny miękki, antypoślizgowy uchwyt, który zapewnia optymalną kontrolę podczas obcinania paznokci. Jego ergonomiczny kształt sprawia, że jest idealny dla osób z zapaleniem stawów, słabymi dłońmi lub problemami z elastycznością. Nasze obcinacze mają ręcznie naostrzone krawędzie tnące z wyprofilowaną końcówką, która umożliwia precyzyjne i bezproblemowe obcinanie paznokci. Dzięki stali nierdzewnej klasy medycznej nie muszą się Państwo martwić o rdzewienie lub korozję produktu. Obiecujemy, że to będzie Państwa ulubiony obcinacz do paznokci przez długie lata.

#### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- 1 x obcinacz do paznokci z szerokim rozstawem szczęk
- 1 x cążki do paznokci z chwytaczem
- 1 x pilnik do paznokci
- 1 x sonda podologiczna
- 1 x kopytko do odsuwania skórek
- 1 x etui do przechowywania

#### SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Ten zestaw do obcinania paznokci jest przeznaczony do różnych zastosowań, m. in. jako narzędzie pomocnicze używane razem z nożyczkami do paznokci, obcinacz do grubych i problematycznych paznokci, a także przyrząd pomocny w leczeniu grzybicy paznokci (**spowodowanej twardnieniem paznokci przez cukrzycę itp.**).

## OSTRZEŻENIA

- Ten produkt jest bardzo ostry. Należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zdezynfekować przed użyciem.  
Podczas użytkowania należy uważać, aby nie ciągnąć skóry, należy tylko obcinać paznokcie.
- W przypadku zapalenia, obrzęku lub bólu należy najpierw ostrożnie zdezynfekować paznokcie u stóp i obcinacz (jodyną lub wodą utlenioną), a następnie obciąć paznokcie i zdezynfekować ponownie.
- **NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ:** Nie należy obcinać paznokci wewnętrzną krawędzią zakrzywionego ostrza, ponieważ może to być bolesne.
- Mechanizm obcinacza do paznokci na ręczce działa prawidłowo tylko z jedną sprężyną. Nigdy nie należy podnosić obu sprężyn i używać ich jednocześnie.
- Użytkownikom, którzy mają poważny problem z wrastającymi paznokciami, zaleca się profesjonalne leczenie. Nie należy samodzielnie korygować paznokci, jeśli nie jest się podologiem.

## INSTRUKCJE:

1. Należy oczyścić wał paznokcia i unieść wrastający paznokieć za pomocą sondy podologicznej.
2. Należy użyć obcinacza do paznokci, aby obciąć paznokcie na żądaną długość.
3. Końcówką obcinacza można usuwać pozostałości z wału paznokciowego, co pomaga w leczeniu zanokcicy i grzybicy paznokci.

## SPOSÓB UŻYCIA:

**Namoczyć stopy:** Podczas moczenia stóp wymieszać wodę z kilkoma łyżkami soli lub mydła antybakteryjnego. Po około 10 minutach paznokcie zmiękną, dzięki czemu ich przycinanie będzie mniej bolesne.

**Czyszczenie:** Produkt należy wyczyścić za pomocą alkoholu po każdym użyciu, aby wydłużyć okres jego użytkowania, a także zapobiec tworzeniu się bakterii.

**Uwaga:** Osoby, u których rozwinęła się zanokcica lub występuje obrzęk bądź infekcja paznokci, muszą wyczyścić paznokcie i obcinacz, aby pozbyć się wszelkich bakterii.

## ZALECENIA:

- Przed obcinaniem grubych paznokci warto namoczyć je w ciepłej wodzie przez 5 minut, aby je zmiękczyć.
- Podczas użytkowania obcinacza do wrastających paznokci należy podnieść do góry tylko jedną sprężynę na ręczce (druga jest zapasowa).
- Należy otworzyć ostrze obcinacza i dopasować je do krzywizny paznokcia, aby można było bezproblemowo obciąć paznokcie.
- Ostrze jest bardzo ostre. Jeśli obcinacz do paznokci nie jest używany, należy zabezpieczyć jego ostrze plastikową osłoną.
- W przypadku pacjentów z poważnymi problemami z wrastającymi paznokciami zalecane jest profesjonalne leczenie.

### Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji



Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone metody ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.



Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w obowiązujących dyrektywach WE.